

手術器具・ハサミ・インプラント器具 etc.

メンテナンス用オイルスプレー

1. 潤滑効果が優れ、サビを防ぎます
2. 除菌・抗菌テストを立証
3. 安全性テストを立証
4. パラフィンオイルが基剤
5. 日本特許 PAT4873755

OZONOIL-αS
オゾノイル アルファ エス

オゾン (O₃) が溶解した
除菌・抗菌力を兼ね備えた
潤滑オイル



290ml
¥2,800 (税別)

オゾノイル α s (アルファエス) は

神戸医療産業都市の(財)先端医療振興財団クラスター推進センターの技術支援を受け、開発に成功したメンテナンス用オイルスプレーです。

除菌・抗菌テスト

枯草菌・大腸菌・黄色ブドウ球菌・肺炎球菌・カンジダ菌・ノロウイルスで効果を示す。
— 日本食品分析センター —

安全性テスト

経口毒性・口腔粘膜刺激性・眼刺激性・皮フ刺激性テストで安全性を示す。
— 日本食品分析センター —

用途

- ・オートクレーブ他で滅菌処理をする前・後に使用することで摩擦を軽減し、擦過腐食を防ぎます。
- ・潤滑性能を発揮します。
- ・器具のメンテナンスに使用することでサビを防ぎます。
- ・除菌・抗菌効果を示します。
- ・安全安心なパラフィンオイルです。

注意

- ・天然ゴムやラテックス製の製品に使わない。
- ・吸入・飲用不可
- ・誤って目に入った時は、よく洗い流して医師の診断を受けて下さい。
- ・スプレー缶表示の注意事項を守ること。

使用方法

- ・使用前に缶をよく振り、噴射口を目標局部に当てて適量を噴霧する。
- ・噴射口のある上部を上にして、常温で保管する。
- ・電気製品に使用時は電源を切って使用する。
- ・使用期限を守って下さい。



オゾノイル α s オイルはオートクレーブでの滅菌に影響を与えません

先行販売品

歯科用ハンドピース
メンテナンス用オイルスプレー



480ml
¥5,500 (税別)

販売元 株式会社 E テック

本社・医療機器開発研究所

〒650-0045 兵庫県神戸市中央区港島9丁目1番地
神戸医療産業都市内KIO 316号室
TEL 078-335-5425 FAX 078-335-5426

〒654-0151 神戸市須磨区北落合3-28-2

<http://www.e-teck.co.jp>

オゾノイル

検索

お問い合わせ先:

■HP(<http://www.e-teck.co.jp>)の使用方法的動画もご覧ください。